



НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: пластырь-ингалятор медицинский «Дыши»®.

НАЗНАЧЕНИЕ: Пластырь-ингалятор «Дыши»® предназначен для ингаляций, клеящийся на одежду. Эфирные масла, испаряющиеся в процессе применения пластыря, способствуют профилактике простудных заболеваний, облегчению их симптомов, нормализации дыхания при заложенности носа, облегчают засыпание.

- СОСТАВ:**
-  масло мятное без ментола (Oleum menthae)
 -  левоментол (Levomenthol)
 -  масло эвкалиптовое (Oleum Eucalypti)
 -  лавандовое масло (Oleum Lavandulae)
 -  пихтовое масло (Oleum Abiesis)
 -  терпентиновое масло (Oleum Terebinthinae)

ОПИСАНИЕ
 Пластырь-ингалятор медицинский «Дыши»® по ТУ 9393-001-58693373-2014 (далее по тексту – пластырь) представляет собой полоску прямоугольной формы с закругленными углами и без них, из нетканого материала прямоугольной формы с закругленными углами с защитным покрытием. На полоску нанесена клейкая масса с эфирными маслами. Пластырь клеится на одежду.


ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 Пластырь рекомендуется применять с целью:

-  уменьшения выраженности симптомов острых респираторных заболеваний (ОРЗ), в т. ч. нормализации дыхания при заложенности носа и облегчения засыпания;
-  профилактики простудных заболеваний.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 Только для наружного применения.

-  Пластырь вынуть из упаковки.
 -  Снять защитное покрытие.
 -  Наклеить липкой стороной на одежду в районе верхней части грудной клетки.
- Также можно наклеить пластырь-ингалятор медицинский «Дыши»® на любую сухую поверхность, которая находится вблизи вас или ребенка (стена рядом с кроватью, стол на рабочем месте и т. д.).
-  Также можно наклеить пластырь-ингалятор медицинский «Дыши»® на любую сухую поверхность, которая находится вблизи вас или ребенка (стена рядом с кроватью, стол на рабочем месте и т. д.).
 -  С профилактической целью пластырь «Дыши»® может применяться в период повышенного риска простудных заболеваний. Для профилактики заражения ОРВИ и другими простудными заболеваниями необходимо наклеить пластырь на верхнюю одежду во время нахождения в общественных местах или транспорте.

Пластырь предназначен для однократного применения.

 Один пластырь действует до 8 часов. По истечении 8 часов пластырь следует отклеить. Пластырь предназначен для однократного применения. Не наклеивайте пластырь на деликатные или белые ткани, ткани с ворсистой поверхностью (бархат, велюр, мех и т.д.), ткани, содержащие в составе более 70 % синтетических материалов, а также на все виды замши, натуральной и искусственной кожи.

 **ОДИН ПЛАСТЫРЬ ДЕЙСТВУЕТ ДО 8 ЧАСОВ.**

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Пластырь-ингалятор медицинский «Дыши»® содержит натуральные эфирные масла, которые:








- **обладают противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным, болеутоляющим и тонизирующим действием,**
- **применяются для профилактики простудных заболеваний и в качестве симптоматического средства в составе комплексной терапии ОРВИ.**

После удаления защитного покрытия, эфирные масла испаряются с поверхности пластыря. Эфирные масла уничтожают патологические микроорганизмы, находящиеся в воздухе, за счет чего снижается риск попадания их в организм. Действие пластыря обусловлено действием эфирных масел, входящих в его состав.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

-  Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
-  Детский возраст до 2 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-  Только для наружного применения. Не наклеивать пластырь на кожу.
-  Избегать контакта пластыря с глазами, со слизистыми оболочками и поврежденными участками кожных покровов.
-  При возникновении аллергической реакции следует немедленно прекратить использование пластыря и проконсультироваться с врачом.
-   Перед применением пластыря детьми до 2 лет, беременными или кормящими женщинами необходимо проконсультироваться с врачом.
-  Не применять лицам с повышенной чувствительностью к компонентам пластыря.
-  Не использовать пластырь, если нарушена целостность упаковки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терапия, оториноларингология.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При повышенной чувствительности к эфирным маслам, содержащимся в пластыре, возможно развитие аллергических реакций.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие пластыря требованиям технических условий при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации пластырь нетоксичен, не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием, не пирогенен; по токсикологическим показателям отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к медицинским изделиям. Пластырь относится к горючим веществам, не взрывоопасен. Требуется осторожность при применении пациентами, склонными к аллергическим реакциям на компоненты композиции эфирных масел.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше + 25 °С и относительной влажности 45–80 %. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска: Пластырь-ингалятор медицинский. Размер: 6 см x 5см, 10 пластырей.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Утилизация: использованный пластырь относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.

Место производства: АО «БЕРОФАРМ», РФ, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80.

Держатель регистрационного удостоверения: АО «АКВИОН», РФ, 123112, г. Москва, ул. Пресненская наб., д. 8, стр. 1, эт. 8, пом. 1Н – комн. 11. Тел.: +7 (495) 780-72-34, www.akvion.ru.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Республики Узбекистан: ООО «ASTOR ALLIANCE», Республика Узбекистан, 100175, г. Ташкент, ул. Ипакчи, 1А. Тел.: (+99895) 199-62-55. E-mail: info@astoralliance.uz.

