

TIBBIY BUYUMNI NOMI: Tibbiy plastir-ingalyator «ДЫШИ».

MAQASD: plastir-ingalyator «ДЫШИ» nafas oladigan, kiyimga yopishtiruvchi. Yamoqni qo'llash paytida bug'langan efir moylari shamollashning oldini oladi, ularning alomatlarini yo'qotadi, burun tiqilishi paytida nafasni normalashtiradi va uxlashni osonlashtiradi.

TARKIBI:




TARIFI:

Tibbiy plastir-ingalyator «ДЫШИ» TY 9393-001-58693373-2014 bo'yicha (matnda keyingi o'rinlarda - plastir) yumaloq burchakli yoki burchaksiz to'rtburchaklar chiziq bo'lib, himoya qoplamali yumaloq burchakli to'rtburchaklar to'qilmagan materialdan yasalgan. Ippa efir moylari bilan yopishtiruvchi massa qo'llaniladi. Yamoq kiyimga yopishtiriladi.

QO'LLANILISHI

Plastirni quyidagi maqsadlarda qo'llash tavsiya etiladi:

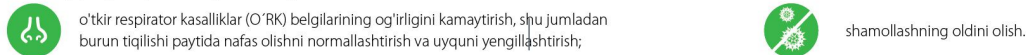

QO'LLASH TARTIBI

Faqat tashqi foydalanish uchun.



Yamoq bir martalik foydalanish uchun mo'ljallangan.

! Bitta yamoq 8 soatgacha amal qiladi. 8 soatdan keyin yamoqni tozalash kerak. Yamoq bir martalik foydalanish uchun mo'ljallangan. Yamoqni nozik yoki oq rangli matolarga, junli sirtli matolarga (baxmal, velyur, mo'yna va boshqalar), 70 % dan ortiq sintetik materiallarni o'z ichiga olgan matolarga, shuningdek, zamsh, tabiiy va sun'iy charringin barcha turlariga qo'llamang.

BITTA YAMOQ 8 SOATGACHA AMAL QILADI.

maslo-dishi.ru

MAHSULOTNING ISHLASH PRINSIPI:

Tibbiy plastir-ingalyator «ДЫШИ» tabiiy efir moylarini o'z ichiga oladi:

- **antivirus, antibakterial, yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi va tonik ta'sirga ega;**
- **shamollashning oldini olish uchun va O' RVI uchun kompleks terapiyaning bir qismi sifatida simptomatik vosita sifatida ishlatiladi.**

Himoya qoplamasini olib tashlaganingizdan so'ng, efir moylari yamoq yuzasidan bug'lanadi. **Efir moylari havodagi patologik mikroorganizmlarni yo'q qiladi va shu bilan ularning tanaga kirish xavfini kamaytiradi.** Yamoqning ta'siri uning tarkibiga kiritilgan efir moylarining ta'siriga bog'liq.

QO'LLASH MUMKIN BO'LMAGAN XOLATLAR



EHTIYOT CHORALARI



QO'LLASH SOHASI

Terapiya, otorinolaringologiya.

FOYDALANISH SHARTLARI

Statsionar va ambulator davolash-profilaktika tibbiyot muassasalarida va uyda qo'llaniladi.

DOZANI OSHIRIB YUBORISH

Agar siz plastir tarkibidagi efir moylariga yuqori sezgir bo'lsangiz, allergik reaksiyalar rivojlanishi mumkin.

KAFOLATLAR

Ishlab chiqaruvchi yamoqning foydalanish, tashish va saqlash shartlariga muvofiq texnik talablarga javob berishini kafolatlaydi.

XAVFSIZLIK VA EKOLOGIK TALABLAR

Ishlash sharoitida yamoq toksik emas, mahalliy timash xususiyatini beruvchi yoki sezgirlashtiruvchi ta'sirga ega emas va pirogenik emas; Toksikologik ko'rsatkichlar bo'yicha u tibbiy asboblarga javob beradi. Yamoq yonuvchan moddadir va portlovchi emas. Efir moyi tarkibining tarkibiy qismlariga allergik reaksiyaga moyil bo'lgan bemorlar tomonidan foydalanilganda ehtiyot bo'lish kerak.

SAQLASH SHARTLARI

+25 °C dan yuqori bo'lmagan haroratda va 45–80 % nisbiy namlikda saqlang. Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

Chikarilish shakli: Tibbiy plastir-ingalyator. Razmer 6 см × 5 см, 10 dona plastir.

Yaroqlilik muddati: Ishlab chiqarilgan kundan boshlab 3 yil.

Utilizatsiya qilish: ishlatilgan plastir A sinf chiqindilariga tegishli va SanPin 2.1.7.2790[10 ga muvofiq yo'q qilinadi.

Ishlab chiqarish joyi: «Берофарм», AJ, Rossiya Federatsiyasi, 394006, Voronej, st. Koltovskaya, 80.

Ro'yxatdan o'tkazilganlik to'g'risida guvohnoma egasi: «AKBIOH», AJ, Rossiya Federatsiyasi, 123112, Moskva sh., Presnenskaya naberejnaya ko'ch, 8-uy, 1-imorat, 8-qavat, IN xonasi – 11-xona. Tel.: +7 (495) 780-72-34, www.akvion.ru.

O'zbekiston Respublikasida iste'molchilar tomonidan shikoyatlarni qabul qilish va qaratilish tashkilot: OOO «ASTOR ALLIANCE», O'zbekiston Respublikasi, 100175, Toshkent, Ipakchi ko'ch. 1A. Tel.: (+99895) 199-62-55. E-mail: info@astoralliance.uz.

